

unique Hurtigguide nakkeplanlegging/godkjenning

Nakkeplanlegging og godkjenning av protesedesign

Når SCP har laget utkast til design for en *unique* protese, blir det sent ut godkjenningsdokumenter til ortopedene


Steg 1- Oversikt over dokumenter

Les klinisk pasientdata og se etter kommentarer fra SCP



Steg 2 – Protesedesign I CT-snitt


Verifiser designet til protesen ved å kikke på protesekonturene I CT-bildene. Se gjennom tversnittbildene I alle nivå.

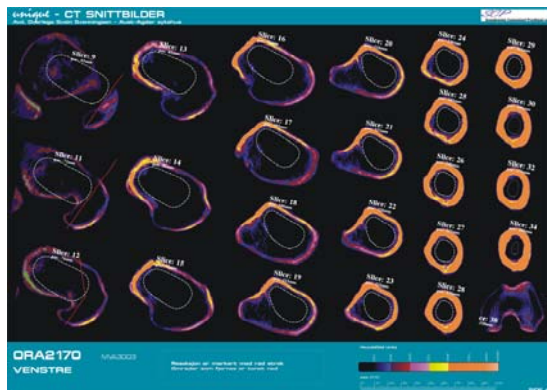

Steg 3 – nytt rotasjonssenter

Ved å bruke en 115% sjablong for acetabularkomponent, finn nytt rotasjonssenter
Fyll inn planlagt acetabulardiameter og planlagt caput I feltene for dette på "Scout view-dokumentet".


Steg 4 - Nakkeplanlegging

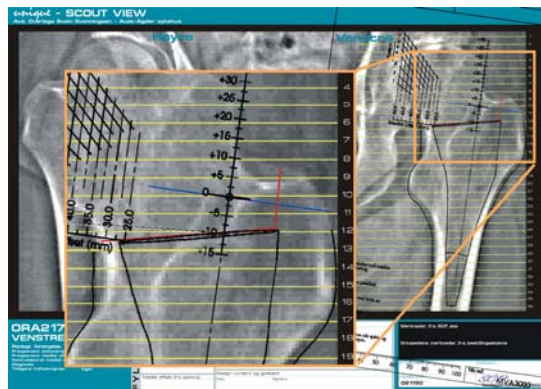

Plasser protese sjablongen I initial posisjonen som er markert på scanogrammet.

Bestem ny medial offset ved å skyve sjablongen sidelengs.
Bestem ny benlengde ved å skyve sjablongen i opp-ned retning.

Steg 5 – Fyll inn data

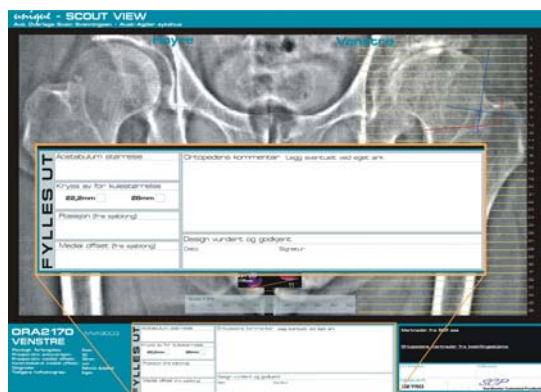

Les av og fyll inn koordinaten fra sjablongen. Signer dokumentet og returner til SCP i vedlagt konvolutt.